

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Instrukcja pobrania materiału genetycznego do badań – 1 szt.
2. Zgoda na wykonanie badania genetycznego – 2 szt.
3. Probówki z wymazówkami – 2 szt.
4. Woreczek strunowy na obie probówki – 1 szt.
5. Rękawiczki – 2 szt.
6. Pudełko metalowe małe do odesłania probówek – 1 szt.
7. Naklejka zabezpieczająca (do zaklejania pudełka metalowego małego) – 1 szt.
8. Koperta foliowa – 1 szt.

WARUNKI UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA ZESTAWU

1. Zestaw do pobierania materiału do badań:
 - wykorzystaj jedynie zgodnie z celem jego przeznaczenia,
 - przechowuj go w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu,
 - przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Procedura pobrania materiału do badań może być przeprowadzona jedynie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełnię praw obywatelskich, po uprzednim zapoznaniu się z całą procedurą i regulaminem usługi.

VITAGENUM
POLSKIE LABORATORIA GENETYCZNE

Vitagenum Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel.: + 48 81 451 17 92
e-mail: biuro@vitagenum.pl
adres strony internetowej: www.vitagenum.pl
centrum pomocy: www.vitagenum.pl/pomoc

VITAGENUM
POLSKIE LABORATORIA GENETYCZNE

Bądź Ego!

**Właśnie uczyniłeś pierwszy krok, by zrobić coś dla Siebie.
Przed Tobą zestaw, dzięki któremu umożliwisz nam
określenie Twoich predyspozycji genetycznych.
Informacje i wskazówki, które przygotujemy dla Ciebie
w raporcie, pozwolą Ci przejąć pełną kontrolę
nad Twoim codziennym życiem.**

Bądź Ego!

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO DO BADAŃ



1. NIE JEDZ, NIE PIJ, PRZEPLUCZ USTA WODĄ

30 minut przed pobraniem materiału do badań nie należy: jeść, pić, palić, rzuć gumy i myć zębów. Bezpośrednio przed pobraniem materiału do badań delikatnie przepłucz usta wodą.



2. ZAREJESTRUJ SWÓJ ZESTAW

Wejdź na <http://www.vitagenum.pl/rejestracja> i wprowadź unikatowy numer zestawu, znajdujący się na próbówce z wymazówką.

UWAGA: Niezarejestrowany zestaw nie będzie mógł być przyjęty przez laboratorium.




3. WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ ZGODY NA WYKONANIE BADANIA GENETYCZNEGO

Wypełnij deklarację. Jedną kopię odeślij nam razem z Twoim materiałem genetycznym, a drugą zachowaj dla siebie.



4. ZAŁÓŻ RĘKAWICZKI


Przed rozpoczęciem pobrania materiału załóż dołączone do zestawu rękawiczki.

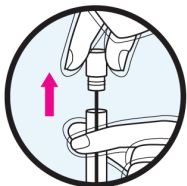

5. OTWÓRZ PROBÓWKĘ Z WYMAZÓWKĄ


Po wyjęciu wymazówki z próbówki trzymaj ją tylko i wyłącznie za korek.

UWAGA: Nie dotykaj końcówką wymazówki dłoni i ubrania ani nie odkładaj jej na stół. Postaraj się pobrać materiał zaraz po wyjęciu wymazówki z próbówki.

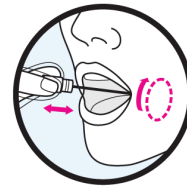


6. POBIERZ MATERIAŁ DO BADAŃ

Włóż końcówkę wymazówki do ust i mocno pocieraj o wewnętrzną stronę policzka. W trakcie pocierania możesz obracać wymazówkę. Czynność tą wykonuj przez ok. 1 minutę.
UWAGA: Pocierając policzek wymazówką nie używaj nadmiernej siły, by nie zranić policzka lub nie złamać wymazówki.

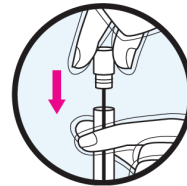

7. ZAMKNIJ WYMAZÓWKĘ W PROBÓWKIE

Po wykonaniu wymazu z policzka włóż wymazówkę do próbówki i szczelnie zamknij.

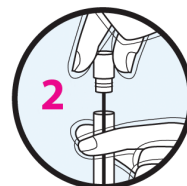

8. DRUGA PROBÓWKA

Powtórz czynności opisane w punktach 5., 6. i 7. dla drugiej próbówki z wymazówką.



9. ZAPAKUJ TWÓJ MATERIAŁ GENETYCZNY

Próbówki z wymazówkami umieść w woreczku strunowym, zamknij go szczelnie, a następnie włóż do małego metalowego pudełka i na zamknięciu umieść naklejkę zabezpieczającą pudełko przed otwarciem.



10. WYŚLIJ DO NAS PROBÓWKI

Do foliowej koperty włóż zapakowane w metalowe małe pudełko próbówki oraz jeden egzemplarz podpisanej deklaracji zgody na wykonanie badania genetycznego. Zaklej kopertę foliową i niezwłocznie wyślij pocztą. Nie poniesiesz żadnych kosztów. Przesyłkę już opłaciliśmy.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymasz informację o gotowych wynikach. Będziesz mógł je pobrać bezpośrednio ze strony Vitagenum.